

том, нажмите и удерживайте клавишу питания в течение 1 секунды для повторного теста, или в течение 3 секунд – для выключения устройства.

- Устройство выключится автоматически по истечении 3 минут, если не будет произведено никаких действий.
- Принудительное выключение вручную возможно в Шаге 2, 3 и 5. Нажмите и удерживайте клавишу питания в течение 3 секунд для выключения устройства.

**ВАЖНО: ОБЯЗАТЕЛЬНО** выждите перед измерением около 30 минут после приема пищи, алкоголя или курения во избежание поломки сенсора!

#### Индикация на экране и возможные неисправности

| ИНДИКАЦИЯ | ЗНАЧЕНИЕ                                                                                                  | ДЕЙСТВИЯ                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Низкий заряд батарей.                                                                                     | Замените обе батарейки на новые, соблюдая полярность. Используйте только алкалиновые AAA батарейки.                |
|           | Тест не может быть проведен ввиду низкого заряда батарей.                                                 | Замените батарейки согласно описанному выше.                                                                       |
|           | Объем выдоха или его интенсивность недостаточна для проведения анализа.                                   | Нажмите на клавишу питания для проведения повторного теста.                                                        |
|           | Выдох не был произведен в течение 3 минут.                                                                | Нажмите на клавишу питания для проведения повторного теста.                                                        |
|           | Тест не может быть проведен ввиду отклонения температуры окружающей среды от допустимых значений: 5-40°C. | Повторите тест при допустимых значениях температуры окружающей среды (5°C– 40°C).                                  |
|           | Если эта ошибка возникла после Шага 4, то это означает, что на сенсор попала слюна во время выдоха.       | Подождите 20 минут и попробуйте снова. Если ошибка "Err2" появится повторно – обратитесь в сервис-центр INSPECTOR. |
|           | Общее количество проведенных тестов достигло 500 и рекомендуется провести калибровку сенсора устройства.  | Обратитесь в сервисный центр INSPECTOR.                                                                            |

\* Рекомендуется проводить калибровку каждые 12 месяцев для сохранения высокой точности измерений.

#### Технические характеристики

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Диапазон измерений                       | 0.00 ~ 2.00 мг/л           |
| Точность показаний                       | ±0.035 мг/л                |
| Дисплей                                  | 4-хразрядный               |
| Готовность сенсора                       | 15 ~ 20 сек.               |
| Тип сенсора                              | Электрохимический          |
| Элементы питания                         | 2 x 1.5V "AAA" алкалиновые |
| Кол-во тестов на одном комплекте батарей | Около 1000 тестов          |
| Размеры (ШхВхГ)                          | 50 мм x 108 мм x 17 мм     |
| Вес                                      | 84 г (с батарейками)       |
| Калибровка                               | 12 мес. / 500 тестов       |
| Рабочая температура                      | 5 ~ 40°C                   |

**ВНИМАНИЕ:** Технические характеристики, функционал и комплектация устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.

#### Гарантия

Срок гарантии на данное устройство – 12 месяцев.

Данное устройство может быть принято в гарантийный ремонт только при наличии фирменного гарантийного талона INSPECTOR. Гарантийный талон должен обязательно содержать серийный номер устройства, дату продажи и печать продавца.

Устройство не подлежит бесплатному сервисному обслуживанию в случае, если:

- ! Утерян или неправильно заполнен гарантийный талон, не указана дата продажи, отсутствует печать продавца;
- ! Были нарушены правила эксплуатации устройства;
- ! Устройство подвергалось механическим повреждениям, в результате перегрева (огня), аварии, при наличии коррозии элементов в результате воздействия влаги (воды) или агрессивных жидкостей, использования не по прямому назначению, небрежного обращения, неквалифицированных попыток вскрытия или ремонта;
- ! Были использованы неоригинальные аксессуары.

Адрес сервисного центра INSPECTOR:

142171, МО, г. Щербинка, ул. Южная, д.8  
Тел.: +7 (495) 504-2747  
E-mail: [support@rd-inspector.ru](mailto:support@rd-inspector.ru)

# inspector®

## ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ΔПКТЕСТЕР



#### РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

*Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием!*

## Внимательно ознакомьтесь со следующими рекомендациями:

- Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией в полном объеме.
- Рекомендуется проводить калибровку сенсора устройства каждые 12 месяцев или после каждых 500 тестов. Использовать устройство без калибровки можно, но показания устройства могут быть неточными.
- Тестирование должно проводиться не ранее чем через 30 минут после приема пищи, алкоголя или курения. Более раннее тестирование может привести к некорректным результатам.
- Остатки алкоголя во рту могут исказить результат измерения.
- Не погружайте устройство в воду, не промывайте его водой.
- Напитки с сильным ароматом или ополаскиватели рта, содержащие алкоголь, могут привести к искажению результата измерения. Подождите 30 минут или тщательно ополосните ротовую полость чистой водой.
- Попадание сигаретного дыма в алкотестер может привести к выходу из строя сенсора.
- Не садитесь за руль в состоянии алкогольного опьянения, даже небольшой уровень опьянения скажется на манере вождения и приведет к аварии.
- Не используйте устройство для определения допустимой дозы алкоголя при вождении автомобиля. Производитель и Продавец не несут никакой ответственности за возможные последствия.
- Если планируете не использовать устройство в течение долгого времени, то храните устройство без установленных батареек.
- При первом тестировании после длительного хранения показания измерений могут быть некорректными – обязательно произведите повторное измерение.
- Замените батарейки, когда на экране возникнет предупреждение о низком заряде батарей, для сохранения точности измерений.
- В случае, если результат измерения превысил значение 0.50 мг/л, для повторного измерения потребуются больше времени для подготовки сенсора, чем обычно.
- Для получения наиболее точных результатов измерения проводите тестирование при рекомендованной температуре использования, указанной в данной инструкции.
- Избегайте слишком сильного выдува, так как при этом на сенсор может попасть слюна и это может привести к поломке сенсора.
- Не храните устройство в местах с повышенной температурой и влажностью. Хранение рекомендуется при комнатной температуре.
- Не вдыхайте воздух во время тестирования.

## Об устройстве


Благодарим Вас за приобретение персонального алкотестера **INSPECTOR AT650** с высокой точностью измерений. Устройство не предназначено для использования в корпоративных целях, а предназначено для индивидуального использования. Устройство производит измерение уровня алкоголя в выдыхаемом воздухе при помощи электрохимического сенсора, который предоставляет результаты измерений с высокой точностью при соблюдении условий эксплуатации.

## Комплектация

- Алкотестер
- Две батарейки AAA
- 3 мундштука
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон

## Вид устройства

1. Мундштук
2. Отверстие для мундштука
3. Экран
4. Клавиша питания
5. Батарейный отсек

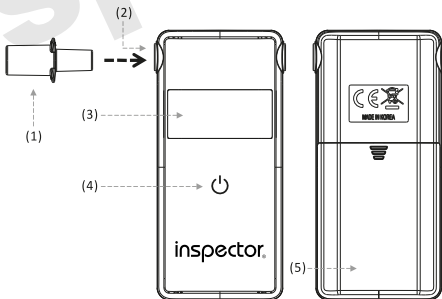

## Подготовка к работе



- 1) Установите мундштук в соответствующее отверстие алкотестера;
- 2) Проверьте, чтобы мундштук был плотно установлен в отверстие;
- 3) Дополнительные мундштуки предназначаются для использования другими людьми из гигиенических соображений.

## Проведение измерений

**Шаг 1.** Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды клавишу питания. Включившийся экран продемонстрирует кол-во проведенных тестов, а затем результат измерения предыдущего теста.

**Примечание:** Если нажать и удерживать клавишу питания в течение 3 секунд произойдет выключение устройства без проведения теста.

**Шаг 2.** Автоматически начнется обратный отсчет, необходимый для подготовки сенсора к измерению

**Шаг 3.** Когда обратный отсчет дойдет до нуля, прозвучит двойной звуковой (бип) сигнал, на экране начнет мигать надпись "BLOW" с отображением на экране трех полос (=). Произведите глубокий вдох, а затем выдох в мундштук, крепко обхватив его губами в течение примерно 4 секунд, до двойного звукового сигнала (щелчка).

**Примечание:** Требуемая продолжительность выдоха может быть длиннее или короче в зависимости от интенсивности выдоха.

**Шаг 4.** Если выдох произведен успешно, начнется анализ на наличие алкоголя, в это время на экране будут перемещаться три полоски, как показано на рисунке слева.

**Шаг 5.** Результат измерения появится на экране в течение 10 секунд, кнопка выключения будет временно заблокирована. После ознакомления с результа-